


COME INVIARE UN MONITORAGGIO HOLTER CON VETPILOT

L'apparecchiatura Cardioline Vetpilot consente di inviare un monitoraggio Holter via telematica ed ottenerne in breve tempo la refertazione.

Prima di inviare l'esame è necessario compilare nella vostra pagina di Ecg on the Web l'apposito modulo che ritrovate nella sezione "invia nuovo Holter".

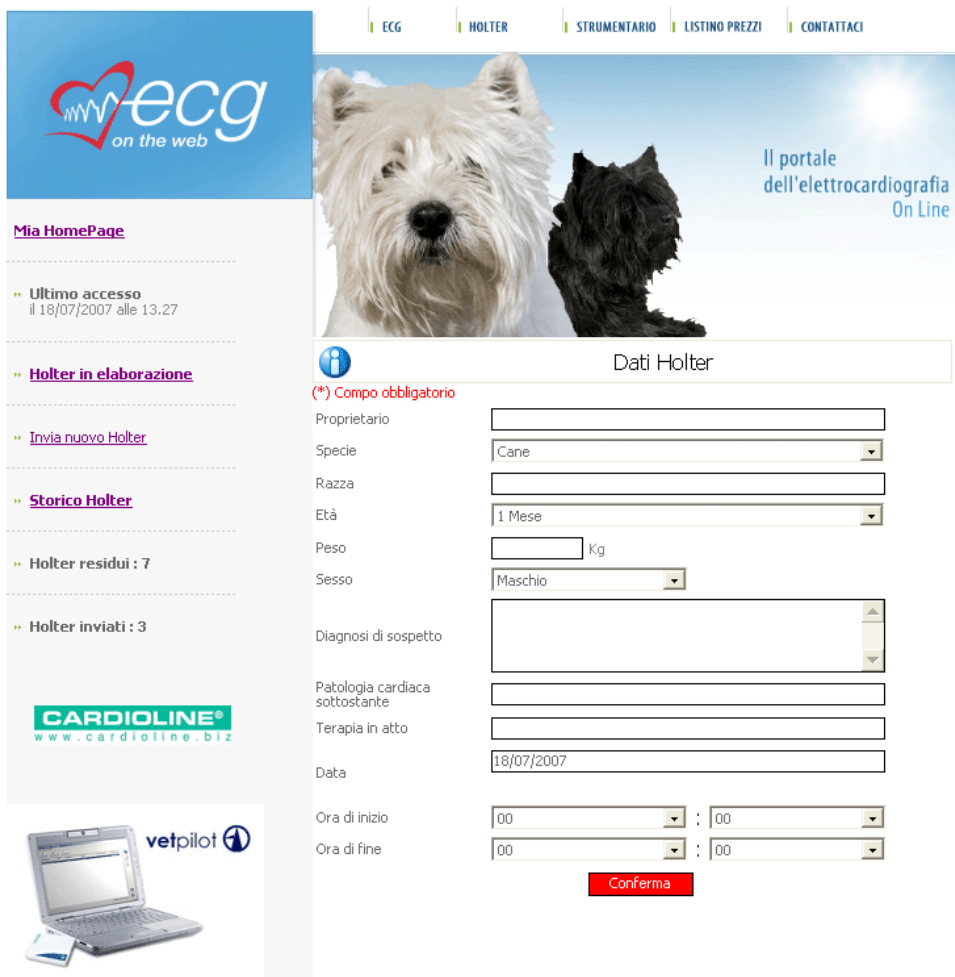

The screenshot shows the 'ecg on the web' website interface. At the top, there are navigation links: ECG, HOLTER, STRUMENTARIO, LISTINO PREZZI, and CONTATTI. The main header features the 'ecg on the web' logo and the text 'Il portale dell'elettrocardiografia On Line'. On the left sidebar, there are menu items: 'Mia HomePage', 'Ultimo accesso il 18/07/2007 alle 13.27', 'Holter in elaborazione', 'Invia nuovo Holter', 'Storico Holter', 'Holter residui : 7', and 'Holter inviati : 3'. Below the sidebar is the 'CARDIOLINE®' logo and a laptop with a 'vetpilot' device. The main content area displays the 'Dati Holter' form with the following fields:

- Proprietario:
- Specie:
- Razza:
- Età:
- Peso: Kg
- Sesso:
- Diagnosi di sospetto:
- Patologia cardiaca sottostante:
- Terapia in atto:
- Data:
- Ora di inizio: :
- Ora di fine: :

A red 'Conferma' button is located at the bottom of the form.

Dopo avere inserito tutti i dati richiesti, è possibile procedere con l'invio dell'esame.

Le indicazioni per l'invio sono riportate nel manuale Vetpilot allegato nell'area sottostante in formato PDF nella sezione 1.10-Opzioni di esportazione (pag. 16-17).

Le operazioni descritte in questa sezione indicano come inviare le informazioni del vostro esame al nostro server FTP. L'indirizzo del nostro server FTP verrà comunicato tramite mail.

Il diario Holter allegato all'esame deve essere inviato via fax il giorno stesso in cui viene inviato per via telematica l'esame Holter.

Il numero Fax a cui inviare il diario del monitoraggio è il seguente:

Fax: 0331/220255